



Guide - (Covid-19)

Desinficering af Røger produkter

Anbefaling om desinficering af Roger produkter

Introduktion

Dette dokument indeholder anbefalinger om desinficering af Roger-produkter i forbindelse med Covid-19. Disse anbefalinger kan med fordel anvendes i situationer hvor Roger produkter deles og anvendes af flere personer.

Coronavirus er et luftbåret virus, der primært spreder sig gennem dråber, der genereres når en smittet person hoster eller nyser, eller gennem dråber af spyt eller når næsen løber.

(kilde: <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>)

Deling af håndholdte eller kropsbårne produkter mellem flere brugere, så som Roger mikrofoner, kan skabe en risiko for overførsel af viruspartikler, fra en bruger til en anden. Selv umiddelbare sunde personer kan overføre Coronavirus, så det anbefales på det kraftigste at desinficere produkterne ved skift mellem brugere.

For hvilke produkter gælder anbefalingen?

Denne anbefaling gælder alle Roger produkter, der bruges af flere personer, for at reducere risikoen for overførsel af Coronavirus.

Valg af desinfektionsmiddel:

Der skal anvendes et overfladedesinfektionsmiddel, der er effektivt til at dræbe indkapslet vira (såsom den nye Corona-virus).

Følgende desinfektionsmidler anbefales:

- Vandbaseret desinfektionsmiddel anbefales generelt
- 70% isopropanol kan alternativ benyttes

Anvend ikke:

- Desinfektionsmiddel med hudblødgøringsmidler, som ofte findes i håndsprit/gel
- Desinfektionsmidler der indeholder ethanol, da det kan skade produkterne
- Blegemiddel (Der indeholder klor eller peroxider, f.eks. brintoverilte)

Vigtige regler for rengøring:

- Desinfektionsmidlet skal bruges i henhold til leverandørens specifikationer om anvendelse
- Tør enheden af med en engangsklud, der er gennemvædet med desinfektionsmiddel
- Bortskaf kluden i en affaldsspand med låg eller i en lukket plastpose
- Sprøjt aldrig desinfektionsmiddel direkte på enheden
- Nedsænk aldrig enheden i desinfektionsmiddel
- Sikre at åbninger, især mikrofonåbninger, aldrig er i kontakt med væske, da dette kan beskadige elektroniske komponenter
- Tryk ikke på nogen knapper, når enheden tørres af med desinfektionsmiddel, eller så længe den er våd

Ansvarsfraskrivelse

Sonova er ikke ansvarlig for skader på grund af implementeringen af ovenstående anbefalinger. Bemærk at alkoholbaserede desinfektionsmidler muligvis kan skade belægninger eller følsomme komponenter på produkterne.

Life is on

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere end 70 år har vi udviklet banebrydende høreløsninger, der gør en stor forskel i hverdagen - både på det sociale og det følelsesmæssige plan. Life is on.

www.phonak.dk

Sonova Denmark A/S
Østre Hougvej 42-44
DK-5500 Middelfart
Tlf. 64 41 78 87